

desensibilize^{KF} 0,2%

desensibilize^{KF} 0,2%

Desensibilizante Solamente Uso Profesional

Lea con atención todas las informaciones de esta receta antes de utilizar el producto. Guárdela para consulta, como mínimo, hasta el total consumo del producto y/o hasta no haber más interacción del producto con su último paciente.

Descripción del Producto
Desensibilize KF 0,2% es un gel desensibilizante de baja viscosidad que posee esencialmente la acción neural del Nitrato de Potasio y, por lo tanto, no interfiere en la velocidad del blanqueamiento dental. Puede ser utilizado antes, durante y después del blanqueamiento pudiendo, en esa concentración, ser llevado para la casa por el paciente. Está indicado para el tratamiento de sensibilidad dental baja, antes, durante y/o después del blanqueamiento dental.

Formas de presentación
Envase conteniendo una jeringa con 2,5g del producto y 1 puntera.

Composición Básica
Ingredientes Activos: Nitrato de Potasio al 5% y Fluoruro de Sodio al 0,2%
Ingredientes Inactivos: Agua Desionizada, Glicerina, agente neutralizante y espesante.

Indicación del Producto
Está indicado en el tratamiento de dientes con sensibilidad moderada y baja a variaciones de temperatura y a alimentos (Hiperestesia dentinaria) y en el tratamiento de la sensibilidad que puede ser causada por blanqueamiento dental.

Precauciones y Contraindicaciones
Evitar la ingestión proposital y excesiva del producto.
No aplicar el producto sobre la encía en mal estado de salud.
No utilizar en pacientes con anemia y/o cualquier sensibilidad a los componentes del producto.
Descontinuar el uso si el paciente presenta alguna reacción indeseable a los componentes del producto.
No inyectable. No reutilizar la jeringa.

Efectos colaterales
La ingestión de grandes cantidades del producto puede causar náuseas y acentuar estados de anemia (efectos del Nitrato de Potasio).

Instrucciones de Uso
1. Limpie la superficie de los dientes eliminando placa, cálculo y otros depósitos que puedan impedir la penetración del producto en los dientes;
2. Aplique el gel desensibilizante uniformemente sobre los dientes (utilice un pincel o micro aplicador Cavibrush) y aguarde un tiempo mínimo de 10 minutos. Alternativamente el gel puede ser aplicado con auxilio de la férula de blanqueamiento, haciendo la aplicación como si fuese el propio blanqueador.
3. Pasado el tiempo de aplicación, remueva el gel de los dientes con algodón y agua en abundancia. Evite que el paciente degluta el desensibilizante.
4. Repita la aplicación del desensibilizante conforme a la necesidad o en caso de blanqueamientos dentales, acompañando el tiempo del tratamiento. El número de aplicaciones no debe exceder una vez al día.

Nota: Pasado el tiempo de aplicación del desensibilizante y con éste aún sobre los dientes, se sugiere friccionar el producto con micro aplicador, cepillo o discos de fieltro en baja rotación y movimientos circulares intermitentes (baja presión). Este procedimiento auxilia mecánicamente a la penetración del agente desensibilizante en el diente mejorando así sus cualidades.
De ser necesario, el paciente puede hacer aplicación en su férula de blanqueamiento en casa. Se debe, sin embargo, orientar rigurosamente al paciente para que éste siga las instrucciones pertinentes y de seguridad y que evite la ingestión del producto. En estos casos es importante que el paciente tenga conciencia de su responsabilidad.

Conservación y Almacenaje
Mantener el producto en su envase original siempre bien cerrado. Almacene el producto a temperaturas entre 5 y 30 °C. No congelar el producto.
Símbolos
Advertencias:
No utilizar el producto si estuviera fuera del plazo de validez. Para descartar el producto, hágalo siguiendo las normas de su país.
Mantener fuera del alcance de los niños.

Fabricado por:
DENTSCARE LTDA - Av. Edgar Nelson Meister, 474 - Bairro: Distrito Industrial - 89219-501 - Joinville - SC - Fono: (047) 34416100 / Fax: (47) 34273377 - Autorización de Funcionamiento MS PSX44XY0XX28
CNPJ: 05.106.945/0001-06 - INDÚSTRIA BRASILEIRA - Registro en la ANVISA nº 80172310018 - Responsable Técnico: Friedrich Georg Mittelstad - CRQ.: 13100147-SC - Marca: FGM PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA.

REC REP Cinterqual

Atendimento al Profesional: + 55 (47) 34416100 - www.fgm.ind.br
fgm@fgm.ind.br

Este material fue fabricado solamente para uso dental y debe ser manipulado de acuerdo con las instrucciones de uso. El fabricante no es responsable por daños causados por otros usos o por manipulación incorrecta. Además de esto, el usuario está obligado a comprobar, antes del empleo y bajo su responsabilidad, si este material es compatible con la utilización deseada, principalmente cuando esta utilización no está indicada en estas instrucciones de uso. Descripciones de datos no constituyen ningún tipo de garantía y, por eso, no poseen cualquier vínculo.

Rev. 01



desensibilize^{KF} 0,2%

Dessensibilizante

desensibilize^{KF} 0,2%

desensibilize^{KF} 0,2%

Desensibilizante Somente Uso Profissional

Leia com atenção todas as informações desta bula antes de utilizar o produto. Guarde-a para consulta, no mínimo, até total consumo do produto e ou até não haver mais interação do produto com seu último paciente.

Descrição do Produto
Desensibilize KF 0,2% é um gel dessensibilizante de baixa viscosidade que possui essencialmente a ação neural do Nitrato de Potássio e, portanto, não interfere na velocidade do clareamento dental. Pode ser utilizado antes, durante e após o clareamento podendo, nessa concentração, ser levado para a casa pelo paciente. É indicado para o tratamento de sensibilidade dental baixa, antes, durante e ou após clareamento dental

Formas de apresentação
Embalagem contendo uma seringa com 2,5g de produto e 1 ponteira.

Composição Básica
Ingredientes Ativos: Nitrato de Potássio a 5% e Fluoreto de Sódio a 0,2%
Ingredientes Inativos: Água Deionizada, Glicerina, agente neutralizante e espessante.

Indicação do Produto
É indicado no tratamento de dentes com sensibilidade moderada a baixa a variações de temperatura e a alimentos (Hiperestesia dentinária) e no tratamento de sensibilidade que pode ser causada por clareamento dental.

Precauções e Contra-Indicações
*Evitar a ingestão proposital e excessiva do produto.
*Não aplicar o produto sobre gengivas em mau estado de saúde.
*Não utilizar em pacientes com anemia e/ou qualquer sensibilidade aos componentes do produto.
*Descontinuar o uso se o paciente apresentar alguma reação indesejável aos componentes do produto.
*Não injetável. Não reutilizar a seringa

Efeitos colaterais
A ingestão de grandes quantidades do produto pode causar náuseas e acentuar estados de anemia (efeitos do Nitrato de Potássio).

Instruções de Uso
1) Limpe a superfície dos dentes eliminando placa, cálculo e outros depósitos que possam impedir a penetração do produto nos dentes;
2) Aplique o gel dessensibilizante uniformemente sobre os dentes (utilize um pincel ou microaplicador Cavibrush) e aguarde um tempo mínimo de 10 minutos. Alternativamente o gel pode ser aplicado com auxílio da moldeira de clareamento fazendo a aplicação como se fosse o próprio clareador.
3) Decorrido o tempo de aplicação, remova o gel dos dentes com algodão e água em abundância. Evite que o paciente degluta o dessensibilizante.
4) Repita a aplicação do dessensibilizante conforme a necessidade ou no caso de clareamento dental acompanhando o tempo do tratamento. O número de aplicações não deve exceder uma vez ao dia.

Nota: Decorrido o tempo de aplicação do dessensibilizante e com este ainda sobre os dentes sugere-se friccionar o produto com microaplicador, escova ou discos de feltro em baixa rotação e movimentos circulares intermitentes (baixa pressão). Este procedimento auxilia mecanicamente a penetração do agente dessensibilizante no dente melhorando assim sua performance.
Se houver necessidade, o paciente pode fazer aplicação em sua moldeira de clareamento em casa. Deve-se, entretanto, orientar rigorosamente o paciente para que este siga as instruções pertinentes e de segurança e que evite a ingestão do produto. Nestes casos é importante que o paciente tenha consciência de sua responsabilidade.

Conservação e Armazenamento
Manter o produto em sua embalagem original sempre bem fechada. Armazene o produto em temperaturas entre 5 e 30 °C. Não congelar o produto.
Advertências:
Não utilizar o produto se este estiver fora do prazo de validade. Para o descarte do produto siga a legislação de seu país. Manter fora do alcance de Crianças.

Fabricado por:
DENTSCARE LTDA - Av. Edgar Nelson Meister, 474 - Bairro: Distrito Industrial - 89219-501 Joinville - SC - Autorização de Funcionamento MS P5X44XY0XX28 - CNPJ: 05.106.945/0001-06 - INDÚSTRIA BRASILEIRA - Registro na ANVISA nº 80172310018 - Responsável Técnico: Friedrich Georg Mittelstadt - CRQ.: 13100147-SC - Marca: FGM PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA.

Atendimento ao Profissional: + 55 (47) 34416100 - www.fgm.ind.br
fgm@fgm.ind.br

EC REP Cinterqual

Av. Ressano Garcia, 41 - 1º F - 1070234 Lisboa Portugal - Fone: +351 21 3867321

Este material foi fabricado somente para uso dental e deve ser manipulado de acordo com as instruções de uso. O fabricante não é responsável por danos causados por outros usos ou por manipulação incorreta. Além disto, o usuário está obrigado a comprovar, antes do emprego e sob sua responsabilidade, se este material é compatível com a utilização desejada, principalmente quando esta utilização não está indicada nestas instruções de uso. Descrições de dados não constituem nenhum tipo de garantia e, por isto, não possuem qualquer vinculação.

Rev.00



desensibilize^{KF} 0,2%

Desensibilizante